

取扱説明書

アクトモア バックサポート ミニ

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1.ご使用上の注意



警告

【死亡または重傷を招く可能性のあるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 本製品を使用中の喫煙はおやめください。
火種の落下などにより火災の原因となります。
- 本製品に火気を近づけないでください。
火災の原因や、やけどをするおそれがあります。
- 口に入れたり、飲み込んだりしないでください。



注意



【軽傷または中程度の傷害を招く可能性のあるもの】

- 必ず適合する車いすに取り付けてください。
- 車いすで姿勢の保持以外の用途には使用しないでください。
- 本製品に刃物などの鋭利な物を近づけないでください。



2.使用方法

本製品は、車いすの座位姿勢をサポートするクッションです。

- ① 車いすの背シートカバーをめくります。
- ② 本製品の表側を、利用者の背中側に向けて取り付けます。
※「フロンティア」のタグが付いている方が裏側です
- ③ 体形や身体状況に合わせて位置を調整し、背シートカバーを戻してください。

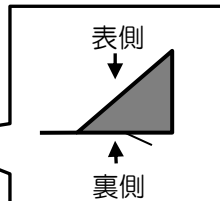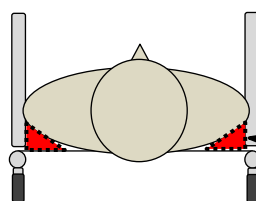

本製品は、面ファスナーが貼り付けられる素材に取り付けが可能です。
 使用する車いすの、背シート面 (a) や背シートカバー裏面 (b) に取り付けることができます。

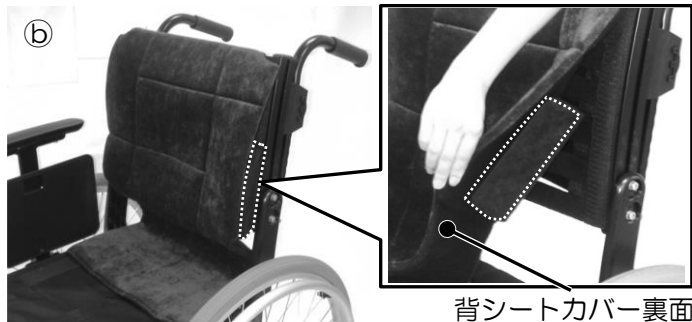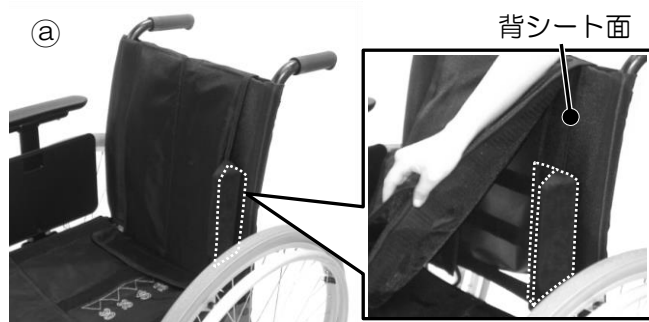

△ 注意 必ず適合する車いすに取り付けてください。


【取り付け例】

体形や身体状況に合わせ、さまざまな位置に取り付けることができます。


左右に
1個ずつ



片側に2個

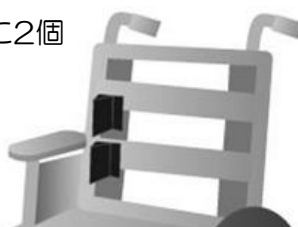

片側に1個

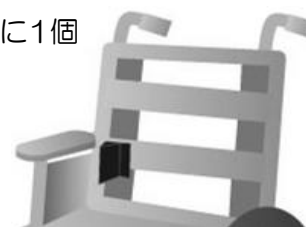

ポイント 体に沿うように本製品を取り付けることで、座位姿勢をサポートします。

3.お手入れの方法

洗濯できます。面ファスナーの生地を傷めないように洗濯ネットに入れてください。
 洗濯後は陰干しで十分に乾燥させてください。

△ 注意 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。
 カビの発生や、過湿による皮膚のしん軟(ふやけ)によるトラブルなどを引き起こすことがあります。

4.仕様

製品名	アクトモア バックサポート ミニ (2個1組)	
本体外形寸法 (幅×奥行×高さ)	5×5×15cm	
重量	約22g (1個)	
素材	中材	ウレタンフォーム
	カバー	ポリエステル

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フリーコール **0120-294-518**

千葉本社 福祉本部 〒261-0002
 千葉県千葉市美浜区新港42-4
 TEL : 043-301-8338

● アフターサービスのお問い合わせ

取扱店