

# 取扱説明書

## Wellstyle パスカ Paska マットレス

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。  
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項  
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

## 1 ご使用上の注意

### 警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いを理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。  
取扱説明書に書かれた内容を理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 包装用ポリ袋は、製品を取り出した後、穴をあけて廃棄してください。  
ポリ袋を誤ってかぶったりすると、窒息する危険があります。
- 心肺蘇生（CPR）処置などで、心臓マッサージを行う際には、マットレスと体の間に大きく硬い板を入れるか、使用者を本製品から下ろして処置してください。  
マットレスがやわらかいため、十分な心臓マッサージ効果が得られません。
- 定期的に圧迫を開放してください。  
このマットレスは効果的に体圧を分散しますが、長時間同一姿勢の体位を続けると、床ずれの原因となります。
- ベッドで使用する際は必ずベッドにベッドサイドレールを取り付け、体の挟みこみに注意してください。  
電動ベッドなどと合わせて使用する場合は、ベッドサイドレール、介助バーなどと本製品の間に体を挟まないように、十分注意してください。弾力性があるマットレスのため、体の一部を挟みこんでケガをするおそれがあります。

## ⚠ 注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 皮膚に反応性の充血など、圧迫による影響が見られないか、状態を観察しながら使用してください。同じ使用状況でも、体調などにより、十分な体圧分散とならないことがあります。異常が認められた場合、ただちに使用を中止し、医師などの指示に従ってください。特に本製品を使い始めたときは、こまめに皮膚の状態を確認してください。
- 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。特にトッパーを洗濯した後は、十分乾かしてから使用してください。カビの発生や、過湿による皮膚のしん軟（ふやけ）で、皮膚トラブルなどを引き起こすことがあります。
- 局部的なへこみ（へたり）などが見られるときは、十分な体圧分散効果が得られないことがありますので、使用を中止し、当社までお問い合わせください。
- 本製品の上に厚手の敷きものなどを敷かないでください。効果的に体圧を分散できず床ずれを発生させるおそれがあります。
- 本製品を突起物の上に置かないでください。破損の原因となります。
- 本製品に火気を近づけないでください。ベースマットのカバーには、難燃加工が施されていますが、不燃ではありません。また、中材のウレタンフォームに火が燃え移ると、火災ややけどの原因となります。
- 低温環境下（10℃以下）では、ウレタンフォームが硬くなる場合があります。その場合、室温になじませてから使用してください。
- 中材を直射日光に当てないでください。ウレタンフォームが変色したり、変質する可能性があります。中材を干す場合は、風通しの良い日陰においてください。
- 本製品を持ち運ぶときは、持ち手を持ってください。カバーのみで本製品を持ち上げると、カバーやファスナー部分が破損するおそれがあります。
- 本製品の上で寝る際は、両端に体の一部がのらないように使用してください。両端にはやや固めのウレタンフォームを使用しているため、十分な体圧分散効果がのぞめない場合があります。


## 2 各部の名称



## 3 製品の特長

- ウレタンフォーム特有のムレを低減した、新しいタイプの床ずれ防止用マットレスです。
- わずか11.5cmの厚みで高機能マットレスと同等に体圧を分散します。
- トッパー内部には綿と低反発ウレタンを組合せ、ワンランク上の寝心地を実現しました。
- トッパー部分は丸洗いで、清潔を保つ事ができます。
- ベースマットの左右両端にはやや固めのウレタンフォームが入っており、離床時の立ち上がる動作をサポートするサイドエッジ付きです。

サイドエッジ

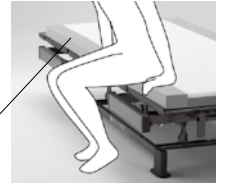

## 4 ご使用方法

- ベッドや床に設置するだけで使用することができます。
- ベッドメイクの際は、伸縮性のあるシーツの使用をおすすめします。織物のシーツを使用する場合は、シーツをゆるめにかけてください。
- 発汗が多い方などの場合、必要に応じて薄手のベッドパッドを併用してください。

### ⚠ 警告

定期的な圧迫を開放してください。  
このマットレスは効果的に体圧を分散しますが、長時間同一姿勢の体位を続けると、床ずれの原因となります。

### ⚠ 注意

- 製品を取り出した際、においが気になる場合は、日陰で風に十分さらしてからご使用ください。
- 厚すぎるベッドパッドや張りすぎたシーツ、伸縮性のない防水シーツはウレタンフォームのやわらかさを損ない、効果的な圧分散効果が得られない場合があります。

## 5 日常のお手入れ

### トッパー

カバー……………洗濯できます。中性洗剤でやさしく手洗いした後、陰干しをしてください。  
洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットに入れて弱水流で洗ってください。

### ⚠ 注意

- 漂白剤の使用は避けてください。生地を傷めるおそれがあります。
- 乾燥機の使用は避けてください。
- 定期的に陰干しをして、清潔な状態を保ってください。

中 材……………洗濯できます。お風呂などで手で押し洗いをして、よく水を切ってから陰干しをしてください。

### ⚠ 注意

定期的に陰干しをして、清潔な状態を保ってください。

### ベースマット

カバー……………洗濯できません。薄めた中性洗剤を含ませた布を固く絞り、ベースマットの表面の汚れをふき取ってください。

### ⚠ 注意

ベンジン、シンナー、クレゾール、ガソリンなどは、材質を傷めますので使用しないでください。

中 材……………洗濯できません。濡れた場合は、風通しの良いところで陰干しをしてください。

# 6 仕様

製品名	Wellstyle Paska <sup>バスカ</sup> マットレス			
種類	83cm幅	83cm幅ショート	91cm幅	91cm幅ショート
サイズ(幅×長さ)	83×191cm	83×180cm	91×191cm	91×180cm
厚み	11.5cm(トッパー：5.5cm、ベースマット：6cm)			
重量	約9.8kg			
材質	トッパーカバー	綿、ポリエステル		
	トッパー中材	ポリエステル綿(シリコンコート混)、ウレタンフォーム		
	ベースマットカバー	ポリエステルニット(防水加工、JAFET特定用途抗菌加工、難燃加工)		
	ベースマット中材	ウレタンフォーム		
	防水カバー (オプション)	ポリウレタン、ポリエステル(防水加工、JAFET特定用途抗菌加工、難燃加工)		

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## 株式会社フロンティア

フリー  
コール **0120-294-518**

千葉本社 福祉本部 〒261-0002  
千葉県千葉市美浜区新港 42-4  
TEL. 043-301-8338



### ●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店