

取扱説明書

オリジナル車いす用クッション2 オリジナル車いす用クッション3

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1 ご使用上の注意



警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いを理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書に書かれた内容を理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 包装用ポリ袋は、製品を取り出した後、穴をあけて廃棄してください。
ポリ袋を誤ってかぶったりすると、窒息する危険があります。
- 定期的に圧迫を開放してください。
このクッションは効果的に体圧を分散しますが、長時間同一姿勢を続けると、床ずれの原因となります。
- 製品をご使用中の喫煙は、おやめください。
火種の落下などによりやけどや火災の原因になります。



注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 常に乾燥した清潔な状態でご使用ください。
カバー洗濯後など、十分乾燥していない状態ではカビの発生や皮膚のトラブルの原因になります。
- 低温的环境下（10℃以下）では、ウレタンフォームが硬くなることがあります。
室温になじませてからご使用ください。

2 製品の特徴

共通特徴

- 2種類のウレタンフォームを組み合わせ、車いす上での体圧を効果的に分散します。

オリジナル車いす用クッション2

- お体に合わせて、「低反発タイプ(紫)」と「高反発タイプ(紺)」からお選びいただけます。
- 車いす座面奥行き寸法に合わせて、「38cmサイズ」と「40cmサイズ」からお選びいただけます。

オリジナル車いす用クッション3

- カバー生地に消臭加工、吸汗・速乾・吸放湿加工、静電防止加工、汚れ除去加工を施しています。
- 生地裏面には、ポリウレタンフィルムラミネート加工による防水加工を施しています。


3 ご使用方法

- 「FRONTIER」マークがひざ裏にくるように車いすのシート(座面)に設置してください。文字の上下に注意してください。

- ⚠ **警告** 定期的に圧迫を開放してください。このクッションは効果的に座圧を分散しますが、長時間同一姿勢を続けると、床ずれの原因となります。

- ⚠ **注意** 製品を取り出した際、においが気になる場合には、風通しの良いところで陰干しをしてから使用してください。

FRONTIER
マーク

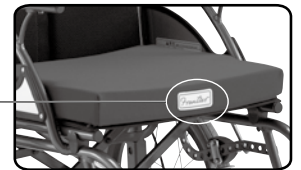

4 お手入れの方法

共通方法

- カバー……………洗濯できます。洗濯機で水洗いし陰干ししてください。ドライクリーニングもできます。
- クッション本体……………洗濯できません。濡れてしまった場合は、風通しの良いところで陰干しをしてください。
- ご使用によりウレタンフォームが変色することがありますが、品質特性に変わりはありませんので、そのままお使いいただけます。

オリジナル車いす用クッション3

- クッション本体……………本体は洗濯できませんが、メッシュの中袋は水洗いが可能です。

5 仕様

| 製品名 | オリジナル車いす用クッション2 | | オリジナル車いす用クッション3 |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種類 | 低反発タイプ(紫) | 高反発タイプ(紺) | — |
| 本体外形寸法 (幅×奥行×厚み) | ①40×40×5~6cm ②40×38×5~6cm | | 42×40×6cm |
| 重量 | 約600g | | 約800g |
| 素材 | 本体 | ウレタンフォーム | |
| | カバー | 表面：ポリエステルニット 裏面：すべり止め加工 | ポリエステルニット、ポリウレタンフィルム (防水カバー) |

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フクシのクトハ

フリー
コール **0120-294-518**

福祉事業本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港 42-4
TEL.043-301-8338



- アフターサービスのお問い合わせ

取扱店