

取扱説明書

ベクター Xクッション ベクター ブレスクッション

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

1 ご使用上の注意



警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 本製品は車いすの座面シート用のクッションです。用途以外の使用はしないでください。
- 包装用ポリ袋は、製品を取り外した後、穴をあけて廃棄してください。
ポリ袋を誤ってかぶったりすると、窒息する危険があります。
- 定期的に圧迫を開放してください。
このクッションは効果的に座圧を分散しますが、長時間同一姿勢の座位を続けると、床ずれの原因となります。
- 本製品を使用中の喫煙は、おやめください。
火種の落下などによりやけどや火災の原因となります。



注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。
- 本製品を正しい向きで車いすのシート（座面）に設置してください。
- 本製品の近くで鋭利なもの（安全ピンなど）を使用する場合は十分注意してください。

2 製品の特長

- 中材のエアセル数を調整し、身体状況に合わせた調整ができるエアクッションです。
- 坐骨結節部にかかる圧を分配し、局所圧による痛みや床ずれリスクの軽減ができる形状です。

㊤ 坐骨結節部にかかる圧を大腿部へ再分配

㊦ 坐骨結節部の局所圧を軽減

㊧ 下肢の内転を防ぐ

㊨ 下肢の外転を防ぐ

㊩ 下肢をまっすぐに保つ



3 ご使用方法

- ① カバーのファスナーを開き、クッション本体を取り出します。
- ② クッション本体のファスナーを開き、身体状況に合わせて各ブロックの中からエアセルを抜いたり他のブロックへ移動させてクッションの厚みを調整します。
- ③ エアセルの調整が終わったらカバーを戻します。

[ベクター Xクッション]



取っ手

[ベクター Xクッション]

クッション本体の「BACK」と書かれたタグの反対側にカバーの取っ手がくるように入れます。

[ベクター プレスクッション]

クッション本体についているストラップを、カバーの「うしろ」と書かれたタグの上にあるリングに通してファスナーを閉じます。

[ベクター プレスクッション]
ストラップ



リング タグ

- ④ 車いすのシート（座面）にクッションを置きます。

[ベクター Xクッション]

取っ手側を前に向けて置いてください。

[ベクター プレスクッション]

カバーの「うしろ」と書かれたタグが後ろ側になるように置いてください。

△注意 エアセルの調整を行った後は、必ず底づきをしていないか確認をしてください。

4 お手入れの方法

カバー…洗濯できます（ベクター Xクッション：40℃以下、ベクター プレスクッション：60℃以下）。裏返して洗ってください。「ベクター プレスクッション」は乾燥機（60℃以下）の使用が可能です。

△注意 アイロン、漂白剤などは使用しないでください。

クッション本体…「ベクター Xクッション」（インサートベース含む）は洗濯できません。

[ベクター Xクッション]

汚れた際は、中性洗剤を含ませた布でふいてください。

「ベクター プレスクッション」はエアセルを入れたまま洗濯（60℃以下）できます。

△注意 乾燥機、漂白剤などは使用しないでください。



インサートベース

5 仕様

製品名	ベクター Xクッション	ベクター プレスクッション
本体外形寸法 (幅×奥行)	37.5×37.5cm、37.5×40cm、 40×37.5cm、40×40cm、42.5×40cm	38×38cm、38×40cm 40×38cm、40×40cm、43×40cm
厚み	約11cm	
重量	約910g	約940g
材質	中材／エアセル インサートベース／ウレタンフォーム カバー（非防水）／ポリウレタン・ナイロン	中材／エアセル 通気カバー／ポリエステル 防水カバー（オプション）／ポリウレタン・ポリエステル

■製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フクシのコトハ

フリー
コール **0120-294-518**

千葉本社 福祉本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港 42-4
TEL. 043-301-8338



●アフターサービスのお問合せ

取扱店