

# 取扱説明書

## Wellstyle パフディ

三角タイプ400／三角タイプ600／リーフタイプ

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。  
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項  
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

## 1 ご使用上の注意



### 警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。  
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 包装用ポリ袋は、製品を取り出した後、穴をあけて廃棄してください。  
ポリ袋を誤ってかぶったりすると、窒息する危険があります。
- 定期的に圧迫を開放してください。  
このクッションは効果的に体圧を分散しますが、長時間同一姿勢の体位を続けると、床ずれの原因となります。
- 製品をご使用中の喫煙は、おやめください。  
火種の落下などによりやけどや火災の原因となります。



### 注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 常に乾燥した清潔な状態でご使用ください。  
カバー洗濯後など、十分乾燥していない状態ではカビの発生や皮膚のトラブルの原因となります。
- 低温な環境下（10℃以下）では、ウレタンフォームが硬くなることがあります。  
室温になじませてからご使用ください。

## 2 製品の特長


- 体圧分散性に優れた特殊ウレタンフォームをやさしい2層構造にして仕上げました。  
しっかりと体を支えてくれるフィルターフォームを中心に、体に当たる部分にソフトな低反発フィルターフォームを使用しています。
- フィルターフォームは従来のウレタンフォームと異なり、3次元の網目構造をしているので通気性に優れています。
- 丸洗い可能で、清潔を保つことができます。
- お体の状況や用途に応じて3タイプからお選びいただけます。また、組み合わせて使用することもできます。

## 3 ご使用方法

- 体位変換をしたい箇所に本製品を差し込んでください。
- 姿勢保持をしたい箇所に本製品を差し込んでください。
- 「FRONTIER」マークのある側のファスナーが体に当たらないように差し込んでください。






**警告** 定期的に圧迫を開放してください。このクッションは効果的に体圧を分散しますが、長時間同一姿勢の体位を続けると、床ずれの原因となります。

**注意** 製品を取り出した際、においが気になる場合には、風通しの良いところで陰干しをしてから使用してください。

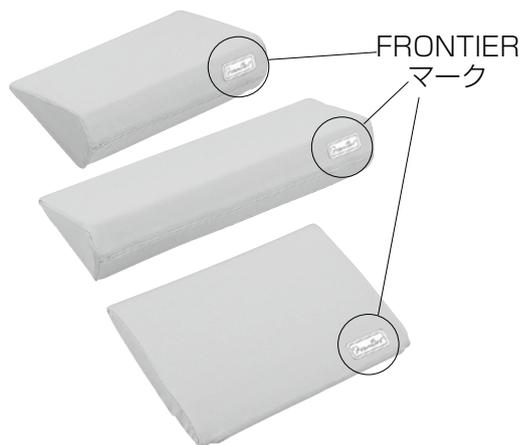

## 4 お手入れの方法

- カバーを洗濯する場合、下記の洗濯表示に従い、水洗いかドライクリーニングをしてください。

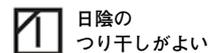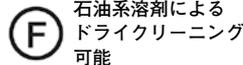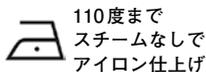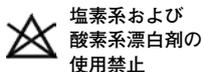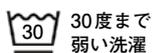

※ 脱水を絞って行わないでください。

- クッション本体は中袋から出さずに手洗いし、水気を十分にきった後、風通しの良いところで陰干ししてください。
- 使用によりウレタンフォームが変色することがありますが、品質特性には変わりありませんので、そのままお使いいただけます。

## 5 仕様

製品名	Wellstyle パフディ		
種類	三角タイプ400	三角タイプ600	リーフタイプ
本体外形寸法 (幅×奥行×厚み)	40×24×12cm	60×24×12cm	40×32×7cm
重量	約330g	約470g	約350g
材質	カバー：ポリエステル 中身：ウレタンフォーム		

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## 株式会社フロンティア

フクシのクトハ

フリーコール **0120-294-518**

千葉本社 福祉本部 〒261-0002  
千葉県千葉市美浜区新港 42-4  
TEL. 043-301-8338



- アフターサービスのお問い合わせ

取扱店