

# 取扱説明書

## アクトモア チアリー チアリー 酸素ボンベ架セット メリー メリー パーキングロック付き トロリー




このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。  
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項  
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

### 表示とその意味

この取扱説明書では、次のような表示を記載しています。よく読んで内容を十分理解した上で、ご使用ください。

製品の取り扱いに際して生じる危険を未然に防止するため、安全上の注意事項をその危険の大きさの程度に応じて、次のように分類して表示しています。

表 示	意 味
 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡し、または重傷を負う内容について記載しています。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡し、または重傷を負う可能性がある内容について記載しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容、および物的損害が発生する可能性のある内容について記載しています。

株式会社フロンティア

# 1 ご使用上の注意

## ⚠ 危険


【死亡または重傷を招くもの】

- 本製品は室内の歩行を補助するための商品ですので、他の目的には使用しないでください。
- ご使用の際は必ず使用状態（広げた状態）にしてください。  
折りたたんだまま使用すると、転倒するおそれがあり危険です。
- エスカレーター・階段などでは使用しないでください。  
段差のあるところでの使用は十分注意してください。転倒のおそれがあり危険です。

## ⚠ 警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。  
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 本製品のユーザー最大体重（P8参照）を守ってください。
- 凹凸や傾斜のある路面、すべりやすい場所、床面の開口付近で使用するときは十分注意してください。  
転倒のおそれがあり危険です。
- 急な加速や急停止、急激な回転、強引な横移動などはしないでください。
- アームレストの前部または後部、あるいは片側だけに極端に加重して使用しないでください。  
転倒するおそれがあり危険です。歩行器の中心に体を置いて、左右のアームレスト支柱に均等に加重してください。（右図参照）
- 本製品を体の後ろに置いて使用しないでください。  
転倒のおそれがあり危険です。
- 肘置きマット支柱のノブねじを凹部以外で締め込まないでください。  
使用中に肘置きマットが落下するおそれがあり危険です。

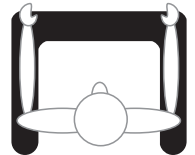

正しい操作位置

### 【アクトモア チアリー レギュラー／チアリー 酸素ボンベ架セット レギュラー】

- キャスターが回転しない状況まで抵抗を強くして使用しないでください。  
キャスターや抵抗器が激しく磨耗したり、転倒するおそれがあり危険です。
- 抵抗が利いた状態では、肘置きマットを手前に引き込むような力を加えたり後方へ進まないようにしてください。  
抵抗が利いた状態では後方に転倒しやすくなり、ケガのおそれがあり危険です。

### 【アクトモア チアリー ブレーキ付き／チアリー 酸素ボンベ架セット ブレーキ付き】

- パーキングロックが掛かった状態で押さないでください。  
車輪が激しく磨耗したり、転倒するおそれがあり危険です。
- 前方のブレーキチューブを家具等に引っ掛けないようにしてください。

### 【アクトモア メリー パーキングロック付き】

- パーキングロックを掛けたまま押さないでください。
- パーキングロックレバーを掴んだ状態で立ち上がりの支えに使用しないでください。  
転倒するおそれがあり危険です。
- パーキングロックレバー先端に衣服などを引っ掛けないようにしてください。


# ⚠ 注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 本製品を仕様以上の高さで使用しないでください。
  - 肘置きマット・グリップ以外の部分を持って使用しないでください。
  - 折りたたんだ状態で壁などに立てかけないでください。  
本体が倒れて破損したり、周囲のものを破損させるおそれがあります。
  - キャスターの車軸や旋回部に異物（糸くず、ひもなど）が絡まないようにしてください。
  - 浴室やシャワーなど水にぬれる場所やすべりやすい場所では使用しないでください。
  - 本体フレームを物に当てたり、乱暴な取り扱いをしないでください。
  - すその広い服装などで本製品を使用する場合は、注意してください。  
衣服がキャスターに巻き込まれるおそれがあります。
  - 歩行の際に後輪に足が接触すると思われる身体状況の方は使用しないでください。
  - 車輪がロックするまで抵抗器を調整しないで下さい。
  - 抵抗器の抵抗が利かなくなった場合やブレーキの利きが悪くなった場合は使用をやめ、当社へご連絡ください。
  - アクトモア メリーを使用中に高さ調整レバーに触れないでください。
  - 分解や改造をしないでください。
  - 火気に近づけないでください。
  - ねじのゆるみなどが見つかった場合は使用をやめ、当社へご連絡ください。
- 【アクトモア チアリー／チアリー 酸素ボンベ架セット】**
- 使用中は本体正面の PUSH ボタン部に手を触れないでください。
  - 開閉の際は、必ず PUSH ボタン部がロックされていることを確認してください。
  - ブレーキ付きのハンドルは必ずポッチで固定された状態で使用してください。
- 【アクトモア メリー パーキングロック付き】**
- 強い力でパーキングロックレバーを操作しないでください。
- 【アクトモア トロリー】**
- トレイ・カゴの上に熱湯や刃物など載せないでください。  
落下した際、ケガのおそれがあり危険です。
  - 高さ調整ピンが確実に固定された状態で使用してください。

# 2 各部の名称


## 【アクトモア チアリー レギュラー】

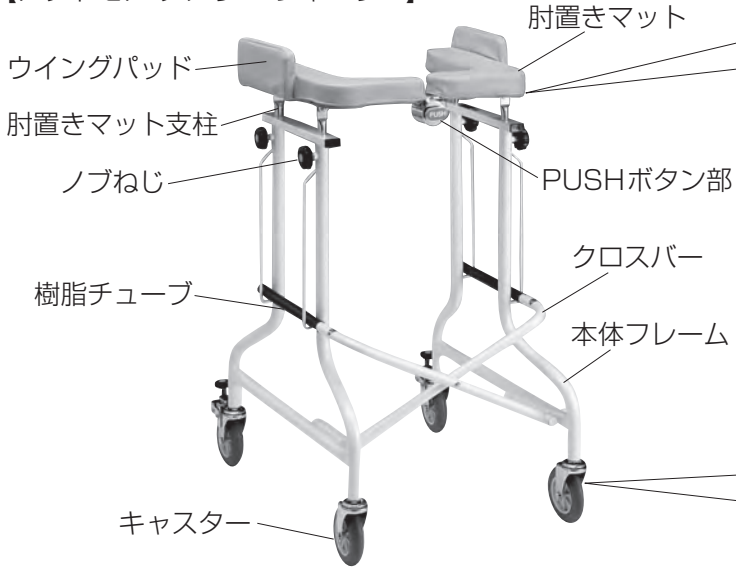


### ブレーキ付きの肘置きマット部



### レギュラーの抵抗器部

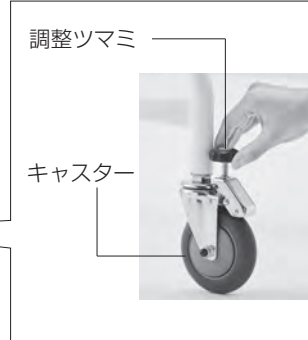

### 酸素ボンベ架セット

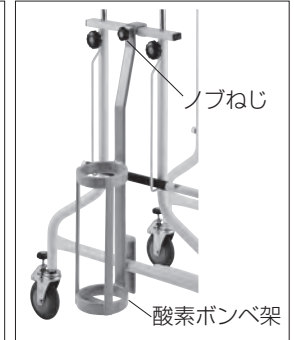

## 【アクトモア メリー】



### パーキングロック付き



## 【アクトモア トロリー】



# 3 製品の特長

## 【アクトモア チアリー／チアリー 酸素ボンベ架セット】

- 腕を支えるパッド付き。少ない力でも回旋がしやすい馬蹄型の歩行車です。
- 折りたたみが可能で、収納時に便利です。
- ハンドルを握りながら、ブレーキ操作が簡単なブレーキ付き仕様もご用意。
- 酸素ボンベ架セットは、酸素ボンベをご使用のまま移動できます。

## 【アクトモア メリー／メリー パーキングロック付き】

- 全幅50cmのコンパクトな馬蹄型の歩行車です。
- 高さ調整はレバー操作で無段階に調整ができます。
- 家具や壁などを傷つけにくいバンパー付き。
- 立ち上がりの介助の際に、歩行車が動かないように、パーキングロック付き仕様もご用意。

## 【アクトモア トロリー】


- 腕を支えるパッドがついた、室内移動がしやすい馬蹄型の歩行車です。
- トレイとカゴがついており、食事や飲み物、日常必要になるものに乗せて室内を移動できます。

# 4 適合調整


## 高さ調整のしかた

### 【アクトモア チアリー／チアリー 酸素ボンベ架セット】


- ① 本体フレームの上部にあるノブねじを旧仕様はゆるめ、新仕様は外して、肘置きマットを上下に動くようにします。
- ② 歩行器の中のやや後方に立ち、使用者の使いやすい高さに肘置きマットの高さを調整します。  
肘置きマット支柱は、必ず4ヶ所すべて同じ高さに調整してください。  
レギュラー、レギュラー酸素ボンベ架セットは5段階、ブレーキ付き、ブレーキ付き酸素ボンベ架セットは4段階の高さ調整ができます。
- ③ 高さが決まったらノブねじを締めて、肘置きマットの支柱を固定します。

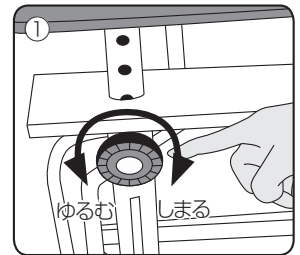

- ・旧仕様  
肘置きマット支柱の凹部に、ノブねじがはまるようにしっかり締めます。
- ・新仕様  
取り外したノブねじを戻し、穴に合わせて締め込みます。

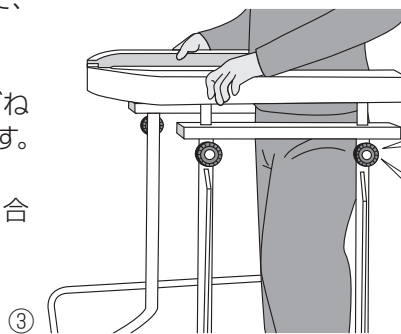


旧仕様

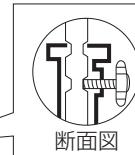

断面図

この凹部位置で高さ調整すると支柱がしっかり止まります。


新仕様

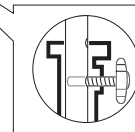

断面図

### 【アクトモア メリー／メリー パーキングロック付き】

- 高さを上げる場合  
レバーを引き上げると肘置マットが上がるので、最適な高さでレバーから手を放してください。
  - 高さを下げる場合  
レバーを引き上げながら肘置マットを押し下げ、最適な高さでレバーから手を放してください。
- レバーから手を放しますと肘置マットの高さは上下共固定されます。

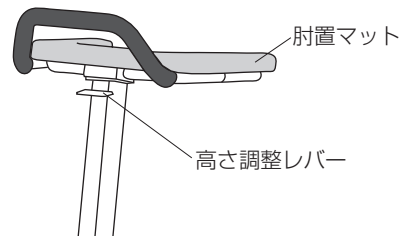

肘置マット

高さ調整レバー

### 【アクトモア トロリー】

- 高さ調整ピンを抜きます。
- 最適なマット高さで高さ調整ピンを差し込み固定してください。

⚠注意 使用前には高さ調整ピンが奥まで差し込まれていることを確認してください。




高さ調整ピン




## 抵抗器の調整

- ① 調整ツマミを時計回りに回すと抵抗が強くなり、反時計回りに回すと弱まります。
  - ② 使用時にキャスターが遅れる側の抵抗を弱めるか、進み過ぎる側の抵抗を強めるなど、ご利用に最適で無理なく直進できる強さまで調整してください。
- ※アクトモア チアリー ブレーキ付き／チアリー 酸素ポンベ架セット ブレーキ付きに、抵抗器は付いておりません

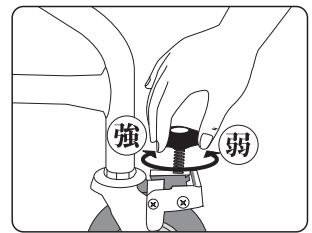

## カゴの高さ調整のしかた（アクトモア トロリーのみ）

- カゴ調整ノブをゆるめて使用者の使いやすい位置に調整できます。
- 肘置きマットの支柱に設置する場合には、スペーサーを装着したままカゴ調整ノブを固定してください。
- 本体支柱に設置する場合には、スペーサーを外してから、カゴ調整ノブを固定してください。


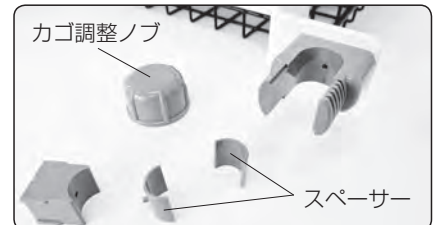


# 5 ご使用方法

## アクトモア チアリー／チアリー 酸素ポンベ架セット


### 開きかた

- ① 正面のPUSHボタン部（(PUSH)と書いてある部分）を押し込み、肘置きマットを左右に開いてください。（開かない場合はPUSHボタン部を押しながら肘置きマットを少し開いてください）  
※PUSHボタン部が固い場合は、左右のマットの折りたたみ幅をさらに狭めると押しやすくなります
- ② 左右のクロスバーを押し下げ、肘置きマットの中央付近を下に押し下げます。このとき、PUSHボタン部が「カチッ」という音と共にロックされます。

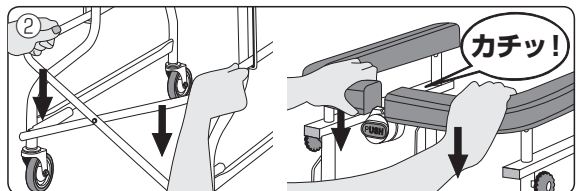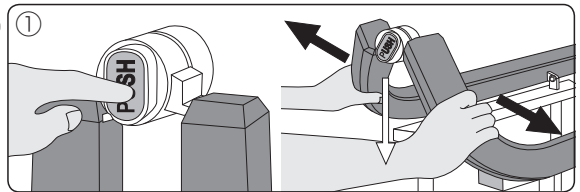

### 【ブレーキ付きのみ】

- ③ ハンドルを引き上げ、最後にハンドルの端部を肘置きマット下の金具に、ポッチが飛び出るように奥までしっかりと差し込んでください。

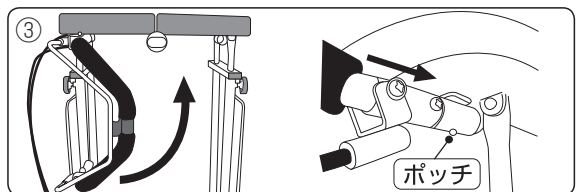


- ⚠ 注意**
- 正面のPUSHボタン部が完全にロックされていることを確認してください。
  - 肘置きマット以外の部分を持って使用しないでください。
  - ブレーキ付きのハンドルは必ずポッチで固定された状態で使用してください。

### 折りたたみかた

- ① 正面のPUSHボタン部を押し込みます。このとき、肘置きマットが少し閉まります。
- ② 左右のクロスバーを引き上げます。PUSHボタン部が「カチッ」という音と共にロックされたことを確認できるまで折りたたんでください。

### 【ブレーキ付きのみ】

- ①②の前にポッチを押しながらハンドルを手前に引き抜き、ハンドルを降ろします。

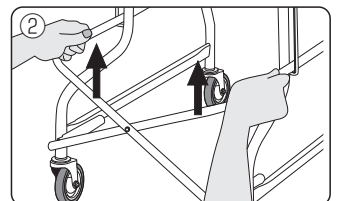

- ⚠ 危険** 折りたたんだ状態のまま使用したり、移動させたりしないでください。

## ブレーキの使いかた


### 【ブレーキ付きのみ】

#### ●ブレーキ

ブレーキレバーを手前に引くと左右の後輪にブレーキが掛かります。

#### ●パーキングロック

- ① ブレーキレバーを握りながら、フックを掛けます。このときに、キャスターが完全にロックされていることを確認してください。
- ② パーキングロックの解除はブレーキレバーを握りながら、フックを外します。

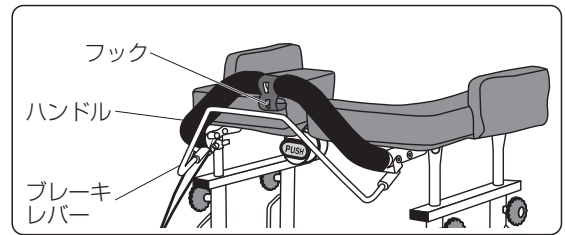


## 酸素ボンベ架の使いかた

### 【酸素ボンベ架セットのみ】

使用可能ボンベサイズは直径約10cmまで、容積めやすは2.8ℓ・3.3ℓです。

- △注意 ●定期的にノブねじのゆるみがないか確認してください。  
●酸素ボンベ以外の物は入れないでください。

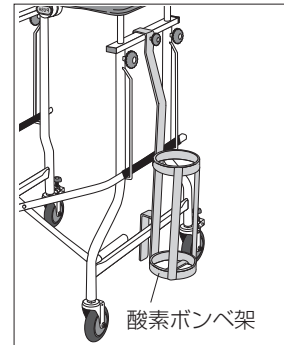

## アクトモア メリー パーキングロック付き


### パーキングロックの使いかた

- ① パーキングロックレバーを手前に引くとロックが掛かります。
- ② パーキングロックを解除するときは、パーキングロックレバーを前方に押し込んでください。



△注意

- パーキングロックを掛けたとき、ゴム足が床に接地していることを確認してください。
- パーキングロックレバーを操作するときは、囲み部分に手足や指を入れないでください。

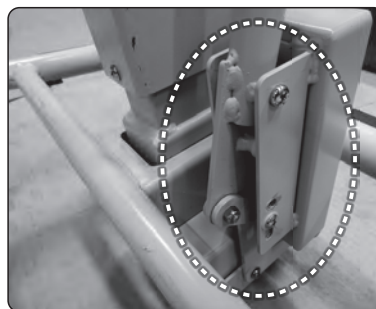

## 6 日常のお手入れ

- 通常は水を含ませたやわらかい布などを固く絞り、ふいてください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。洗剤を使用した後は、水を含ませた布を固く絞り、洗剤が残らないようにふき取ってください。最後に乾いた布で水滴・湿気をしっかりふき取ってください。

- △注意 ●シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。  
●中性洗剤以外の洗剤は使用しないでください。製品の劣化や傷がつく原因となります。

# 7仕様

製品名	アクトモア チアリー			
	レギュラー	レギュラー 酸素ボンベ架セット	ブレーキ付き	ブレーキ付き 酸素ボンベ架セット
本体外形寸法 (幅×奥行×高さ)	51.5×65× 87.5~107.5cm	63.5×65× 87.5~107.5cm	54.5×62× 87.5~103.5cm	65×62× 87.5~103.5cm
馬蹄内寸法	幅34cm			
折りたたみ時全幅	20cm	32.9cm	22cm	34.9cm
重量	約13kg	約15kg	約16kg	約18kg
使用者最大体重 (積載物含む)	80kg			
キャスター仕様	抵抗器付(後輪)		—	
材質	スチール			

製品名	アクトモア メリー		アクトモア メリー パーキングロック付き
	本体外形寸法 (幅×奥行×高さ)	50×51.5×79~106cm	
馬蹄内寸法	幅30.5cm		
重量	約11.7kg	約14.3kg	
使用者最大体重 (積載物含む)	80kg		
キャスター仕様	抵抗器付(後輪)		
材質	スチール		

製品名	アクトモア トロリー		
本体外形寸法 (幅×奥行×高さ)	52.5×62×87~107cm		
馬蹄内寸法	幅32cm		
重量	約11kg		
使用者最大体重 (積載物含む)	80kg		
キャスター仕様	抵抗器付(後輪)		
材質	スチール		

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## 株式会社フロンティア

フクシのクトハ

フリー  
コール **0120-294-518**

千葉本社 福祉本部 〒261-0002  
千葉県千葉市美浜区新港42-4  
TEL.043-301-8338



### ●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店