

取扱説明書

アクトモア ラパン

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1 ご使用上の注意

危険

【死亡または重傷を招くもの】

- 本製品は歩行および立ち上がりを補助するための製品です。他の用途では使用しないでください。
両手で体を支えることができない方は使用できません。
- ご使用の際は必ず使用できる状態（カチッと音がするまで広げた状態）にしてください。
折りたたんだまま使用すると、転倒のおそれがあり危険です。
- 次のような場所では使用しないでください。
 - ・屋外 ・エスカレーター ・階段 ・坂道 ・バスや電車の中
 - ・砂や泥のある場所 ・水たまり ・滑りやすい場所
 - ・暗くて周囲が見えない場所 ・その他の危険が予想される場所

警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- グリップ以外を握って使用しないでください。
破損や、転倒するおそれがあります。
- 本製品を体の後ろに置いて使用しないでください。
転倒のおそれがあり危険です。
- 高さ調整をする際、4本の脚先が同じ高さでセットされているか確認してください。
バランスを崩し、転倒するおそれがあります。
- 脚部4点を必ず接地させて使用してください。
歩行器がゆがんだり、不安定になり転倒するおそれがあります。
- 製品の使用者最大体重（P4参照）を守ってください。
- 穴やくぼみのない平らな場所で使用してください。
歩行中に脚先が穴やくぼみ（敷居や側溝など）に挟まり、そのまま体重がかかると転倒するおそれがあります。
- 柔らかい床では使用を控えてください。



注意


【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 脚先を床やベッドなどに固定して使用しないでください。
- 分解・修理・改造をしないでください。
変形や破損をするおそれがあります。
- 火気、熱源に近づけないでください。
変形・変質・変色・燃焼のおそれがあります。
- 保管時は高温・多湿・直射日光を避けてください。
- 踏み台、椅子、はしごなどの用途では使用しないでください。
ケガをするおそれがあります。

2 製品の特長

- グリップ(押し手)を、持ち上げやすい位置(標準と1.5cm前方)に合わせた調整ができます。
- グリップ(押し手)を、握りやすい位置(外向き、内向き)に合わせた調整ができます。
- 6段階に高さ調整ができるため、お体に合わせた設定ができます。


3 各部の名称

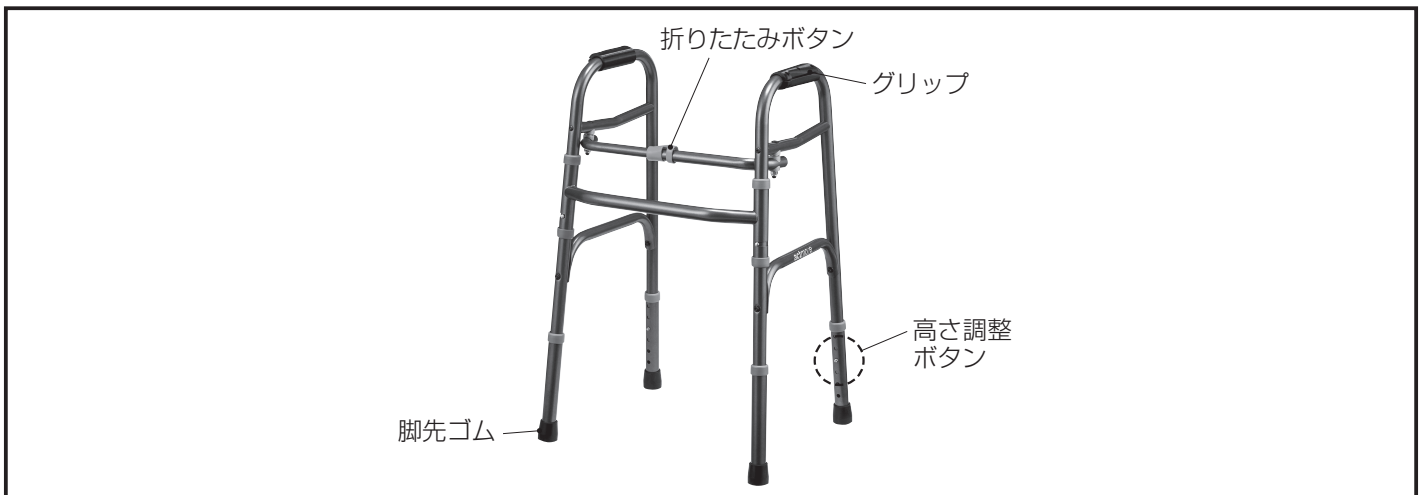


4 適合調整

グリップ位置調整のしかた

- グリップの向き(標準仕様：外向き)
握りやすいグリップの向きに調整が可能です。
- ① 六角棒レンチ(2.5mm)を使い、グリップのネジ3ヶ所をゆるめます。
 - ② グリップを取り外し、向きを変えてフレームに戻します。このとき、グリップ内径にある凸部を、フレーム側の穴にはまるように入れてください。
 - ③ ゆるめた全てのネジをしっかりと固定してください。

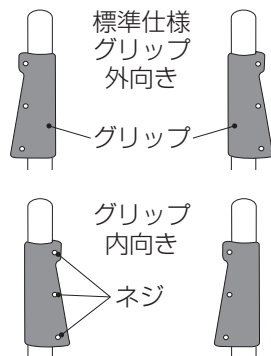

- グリップの位置(調整範囲：1.5cm前方)
持ち上げしやすいグリップの位置に調整が可能です。
- ① 六角棒レンチ(2.5mm)を使い、グリップのネジ3ヶ所をゆるめます。
 - ② グリップを取り外し、1.5cm前方に位置を変えてフレームに戻します。このとき、グリップ内径にある凸部を、フレーム側の前方にある穴にはまるように入れてください。
 - ③ ゆるめた全てのネジをしっかりと固定してください。

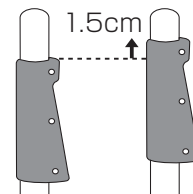


高さ調整のしかた

高さ調整ボタンを押しながら上下にスライドさせ、ご使用に最適な高さに合わせてください。

△ 注意

- 指を挟まないように注意してください。
- 足先パイプは4本とも同じ高さの穴位置にセットされているか確認してください。
- 調整ボタンが確実にロックされていることを確認してからご使用ください。

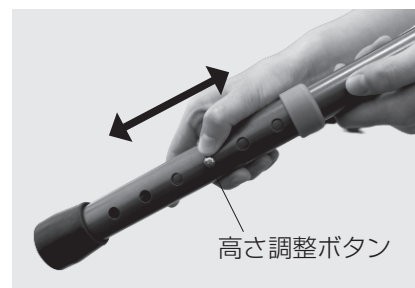

ポイント

まっすぐ立って腕を下げたときの手首の位置、あるいは大転子のあたりを、グリップ(押し手)の高さの基準にします。

5 ご使用方法

1. 開きかた

- ① 左右のグリップを握り片側からゆっくり開きます。
- ② 折りたたみボタンが「カチッ」と音が鳴るまで左右へ開きます。



開閉ロックピンがロックできない場合は「カチッ」と音がするまで、2~3度ゆっくりと動かしてください。

△ 注意

本製品を開く際、手や指を挟まないよう、注意してください。

2. 折りたたみかた

- ① 開閉ロックピンをカバー(橙)の上から押しながら、片方のグリップを握り、内側に折りたたみます。
- ② もう片方のグリップも内側に折りたたみます。




△ 注意

- 本製品を折りたたむ際、手や指を挟まないよう、注意してください。
- 折りたたんだ際、本製品は自立しないので注意してください。

3. 歩行のしかた

- ① グリップを両手で握り、歩行器を持ち上げ、体の前方に下ろします。
 - ② 両手で体を支えながら、片足を1歩前に出し、次に反対の足も前に出して両足をそろえます。
- ①～②の動作を繰り返し、少しずつ歩行します。

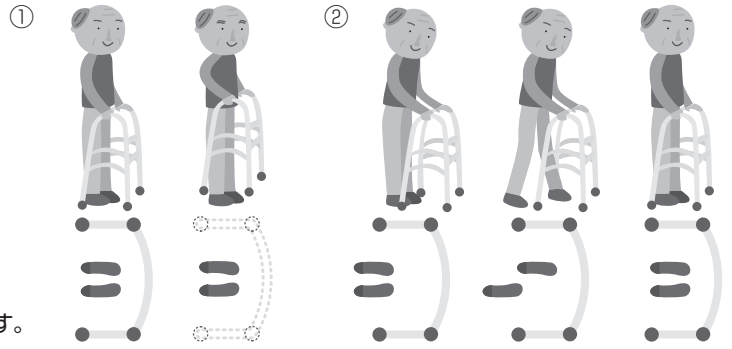

ポイント

- 両手で持ち、左右均等に体重をかけてください。
- トイレの前に置いて、立ち上がる時の支えとしても便利です。

△注意

後ろに置いて使用しないでください。立ち上がる時も、必ず歩行用グリップを握って使用してください。

6 お手入れの方法

使用前・使用後には必ず下記の事項を点検・整備し、常に安全な状態でご使用ください。

- ご使用後は水に濡らした布か、柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 汚れがひどいときは薄めた中性洗剤をしみ込ませた布で拭き、その後水で濡らした布で洗剤分を拭きとってください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤、磨き粉、たわしなどは使用しないでください。

7 仕様

製品名		アクトモア ラパン	
		スリム	レギュラー
使用時サイズ	幅	49～51cm	56.5～57.5cm
	奥行	40.5～42.5cm	46.5～48.5cm
	高さ	67～80cm	78～91cm
折りたたみ時サイズ (幅×奥行×高さ)		49×12.7× 67～80cm	56.5×12.7× 78～91cm
グリップ内幅		31.5～35cm	38～41cm
高さ調節		6段階(2.6cm刻み)	
重量		約2.5kg	約2.8kg
使用者最大体重(積載物含む)		80kg	
材質		フレーム：アルミ・スチール／グリップ：樹脂	

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フクシのコトハ

フリーコール **0120-294-518**

千葉本社 福祉本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港 42-4
TEL.043-301-8338



●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店