

# 取扱説明書

## 特殊寝台付属品

# Wellstyle エスマットレス

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。  
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項  
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

## 1 ご使用上の注意

### ⚠ 警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いを理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。  
取扱説明書に書かれた内容を理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 包装用ポリ袋は、製品を取り出した後、穴をあけて廃棄してください。  
ポリ袋を誤ってかぶったりすると、窒息する危険があります。
- 定期的に圧迫を開放してください。  
このマットレスは効果的に体圧を分散しますが、長時間同一姿勢の体位を続けると、床ずれの原因となります。
- マットレスに火気を近づけないでください。  
やけどや火災の原因となります。
- ベッドで使用する際は必ずベッドにベッドサイドレールを取り付け、体の挟みこみに注意してください。  
体の一部を挟みこんでケガをするおそれがあります。

### ⚠ 注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 常に乾燥した清潔な状態でご使用ください。  
カバー洗濯後など、十分乾燥していない状態ではカビの発生や皮膚のトラブルの原因となります。
- 低温な環境下では、ウレタンフォームが硬くなる場合があります。  
室温になじませてから使用してください。
- 本製品を使用しながら、電気毛布を使用しないでください。
- 中材を無理な方向へ折り曲げないでください。
- 本製品は表裏を間違えずに使用してください。

## 2 製品の特長

- 特長的な4つのエリアで、背骨のS字ラインに沿ったスリット加工により体をサポートします。
- カバーは、さらっとした肌ざわりのアクアジョブ®と、ふわふわ感が続くウオシュロン®中綿を使用。
- 両サイドはやや硬く感じるスリット加工で、離床時の立ち上がる動作をサポート。
- ウレタン特有のムレを低減するため、空気の流れを作るスリット構造マットレスです。

## 3 ご使用方法

- 写真のようにベッドに設置するだけで使用することができます。
- ベッドメイクの際は、伸縮性のあるシーツの使用をおすすめします。織物のシーツを使用する場合は、シーツをゆるめにかけてください。
- 発汗が多い方などの場合、必要に応じて薄手のベッドパッドを併用してください。



### △ 注意

- 製品を取り出した際、においが気になる場合は、日陰で風に十分さらしてからご使用ください。
- 厚すぎるベッドパッドや張りすぎたシーツ、伸縮性のない防水シーツはウレタンフォームのやわらかさを損ない、効果的な圧分散効果が得られない場合があります。

## 4 お手入れの方法

カバー……………洗濯できます。中性洗剤でやさしく手洗いした後、陰干しをしてください。  
洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットに入れて弱水流で洗ってください。

### △ 注意

- 漂白剤の使用は避けてください。生地を傷めるおそれがあります。
- 乾燥機の使用は避けてください。
- 定期的に陰干しをして、清潔な状態を保ってください。

中 材……………洗濯できます。お風呂など、手で押し洗いをして、よく水を切ってから陰干しをしてください。

### △ 注意

定期的に陰干しをして、清潔な状態を保ってください。

## 5 仕様

製品名		Wellstyle エスマットレス			
種 類		83cm幅	83cm幅ショート	91cm幅	91cm幅ショート
本体外形寸法(長さ×厚み)		191×8.5cm	180×8.5cm	191×8.5cm	180×8.5cm
材 質	カバー	綿、ポリエステル			
	中 材	ウレタンフォーム			

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## 株式会社フロンティア

フリー  
コール **0120-294-518**

千葉本社 福祉本部 〒261-0002  
千葉県千葉市美浜区新港 42-4  
TEL. 043-301-8338



### ●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店