

取扱説明書

アクトモア バックサポート アナトミック

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

1 ご使用上の注意

⚠ 警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 包装用ポリ袋は、製品を取り外した後、穴をあけて廃棄してください。
ポリ袋を誤ってかぶったりすると、窒息する危険があります。

⚠ 注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。
- 本製品は車いすの背もたれ以外の目的で使用しないでください。
- 本製品を正しい向きで車いすの背もたれに設置してください。
- 火気、熱源に近づけないでください。
- 鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- 切断したり穴を空けて使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所で保管しないでください。
- 分解や改造をしないでください。

2 製品の特長

- 空気が充填されたスマートセルが詰まった背クッションです。
- 中材のスマートセルを抜いたり足したりすることで、身体状況に合わせた形状に調整できます。
- 骨盤をしっかりサポートし、背骨にかかる圧を分配し、局所圧による痛みや床ずれリスクの軽減ができる構造です。
- 本製品の厚みにより車いすの座奥行きを短く補正できます。



3 ご使用方法

取り付け可能な車いす

座幅37.5~45cmまでの車いすに設置できます。

設置する車いすの背シートのカバーを取り外し、本製品のポケットが後ろ側になるように取り付けます。面ファスナーで固定されていることを確認してください。



スマートセルの調整のしかた

- ブロック内のスマートセルは、抜いたり足したりせずご使用いただけます。
- スマートセルの数の調整が必要なときは、以下の手順で専門職の指導に基づいて使用してください。

- ① 通気カバーのファスナーを開き、クッション本体を取り出します。
※利用者が車いすに座ったままクッション本体を取り出さずに行うこともできます
- ② クッション本体のファスナーを開き、身体状況に合わせて各ブロックの中からスマートセルを抜いたり他のブロックへ足したりしてクッションの厚みを調整しファスナーを閉じます。
中央ブロックのスマートセルを調整するときは、クッション本体を通気カバーから取り出して背面の穴から出し入れしてください。
- ③ 調整後、クッション本体の「BACK」と書かれたタグを下側に向けて通気カバーに入れファスナーを閉じます。



13個のブロック
空気が充填されたス
スマートセルが詰ま
ったクッション本体



クッション
本体

スマート
セル

△注意 スマートセルの調整後は、必ず底づきしていないか確認をしてください。



4 お手入れの方法

- 通気カバー……洗濯(水温60度以下)できます。
裏返して洗ってください。乾燥機(60度以下)の使用が可能です。
△注意 アイロン、漂白剤などは使用しないでください。
- クッション本体…中材のスマートセルを入れたまま洗濯(60度以下)できます。
△注意 乾燥機、漂白剤などは使用しないでください。

5 仕様

製品名	アクトモア バックサポート アナトミック
本体外形寸法(幅×高さ×厚み)	45×48×8cm
重量	約880g
材質	中材(スマートセル)：ナイロン 通気カバー：ポリエステル

■製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フクシのコトハ
フリー
コール **0120-294-518**

千葉本社 福祉本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港42-4
TEL.043-301-8338



●アフターサービスのお問合せ

取扱店