

取扱説明書

Wellstyle カuttingボード Wellstyle カuttingボード フードヘルプ付き

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1. ご使用上の注意



警告

【死亡または重傷を招く可能性のあるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 使用目的以外の用途には使用しないでください。
- ストープやガスコンロなど、火気のそばに置かないでください。変色や変形の原因となります。



注意

【軽度または中程度の傷害を招く可能性があるもの】


- 平らな安定した場所で使用してください。ケガの原因となります。
- タワシや研磨剤で洗わないでください。表面に傷がつくおそれがあります。
- 必ず洗ってからご使用ください。
- 洗った後はしっかりと乾燥させてから片づけてください。変形するおそれがあります。
- 高い所から落とすなど、強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
- 耐熱温度は-30度～+70度までのため、食洗機を使用する場合は設定温度に気をつけて使用ください。

2.使用方法

使用方法①：通常のまな板として食材を切るために使う

使用方法②：本製品のへりを利用して食材を固定する

使用方法③：フードヘルプを取り付けて、食材の皮をむいたり、切ったりする

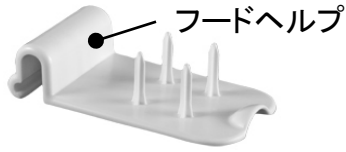


⚠ 注意

必ず洗ってからご使用ください。

フードヘルプの取り付けかた（フードヘルプ付きのみ）

図のようにフードヘルプをへりに引っかけて本製品に固定します。へり3カ所のどこにでも取り付けることができます。

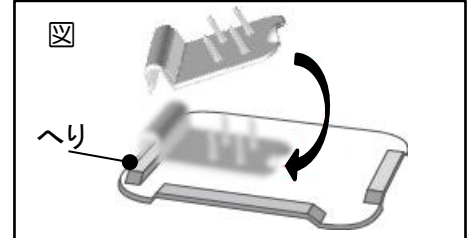

3.お手入れの方法

- 中性洗剤を使って、スポンジできれいに洗ってください。
- しっかりと水気を切って保管してください。
- 食洗機を使用する場合は70度以下に設定し、完全に運転を終了させてください。

⚠ 注意

- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 金属タワシや研磨剤を使用しないでください。
- 食洗機を使用する際は、落下したり、回転しないように本製品を入れてください。

4.仕様

商品名	Wellstyle カuttingボード	Wellstyle カuttingボード フードヘルプ付き
サイズ（幅×奥行）	22×17cm	
重量	約360g	
食洗機／乾燥機の使用	使用可 ※設定温度70度以下	
材質	メラミン樹脂	メラミン樹脂、ポリカーボネート

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フクシのこトハ

フリーコール 0120-294-518

千葉本社 福祉本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港42-4
TEL：043-301-8338

●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店