

取扱説明書

T字杖 アクトモアステッキ きらら

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項や
使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1.ご使用上の注意



警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する場合は、十分に注意してください。
取扱説明書に書かれた内容を理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 雪や凍結などのすべり止め効果のききにくい場所では使用しないでください。
転倒のおそれがあります。
- 傾斜や表面がすべりやすい場所などで使用する場合は、十分に注意してください。
転倒のおそれがあります。
- 道路の側溝の溝や凹みがある場所などで使用する場合は、十分に注意してください。
杖先が挟み込まれ、破損や転倒するおそれがあります。
- エスカレーターや動く歩道、階段などで使用する場合は、十分に注意してください。
バランスを崩し転倒するおそれがあります。
- 使用前には、必ず各部の点検をしてください。（「3. 保守・点検について」参照）
- 分解・改造をしないでください。
事故の原因となります。
- 用途以外（登山用、護身用など）の使用はしないでください。
- 本製品に異常がみられる場合は、当社へ連絡してください。



注意

【軽傷または中程度の傷害を招くもの】


- 体に合った長さに調整して使用してください。（「2. 適合調整」参照）
長さを調整する際は、指を挟まないように注意してください。
- 本製品を火気に近づけないでください。
熱くなった金属部でやけどをするおそれがあります。
- 次のような場合は、使用を停止してください。
 - ・購入時に自立歩行ができていても、自立歩行ができなくなったとき
 - ・体重の一部を支えないと歩行ができなくなったとき

2. 適合調整

1. 長さのめやす

軽く肘を曲げた状態で握れる長さが一般的に力が入りやすいとされています。

- ① 杖のグリップを持ち、杖の先を足先の前方20cmに置き、肘の角度を140～150度（軽く肘が曲がった状態）に曲げた状態が杖の長さのめやすです。
 - ② 自然な姿勢で、杖を持つ側の肩が上がっていないか確認してください。
- ※あくまでも一般的なめやすです。実際に杖を使用する方の状態によって判断してください

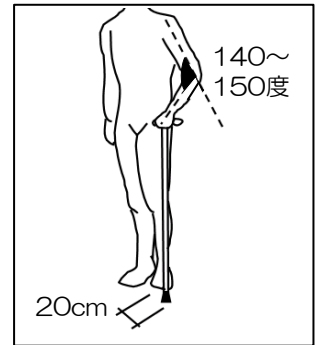


2. 長さの調整方法

- ① 止めネジをゆるめます。
- ② 調整ボタンを押して、お好みの長さに合うように長さ調整穴に合わせます。
- ③ 長さの調整ができれば、止めネジを確実に締めてください。

⚠ 注意

- 調整ボタンが、長さ調整穴に確実にハマっていることを確認してください。
- 止めネジが確実に締まっていることを確認してください。止めネジを確実に締めても、調整ボタンを押すと簡単にスライドするときは、止めネジの中に入っている止めネジリングが抜け落ちている場合があります。止めネジリングが入っているか確認してください。

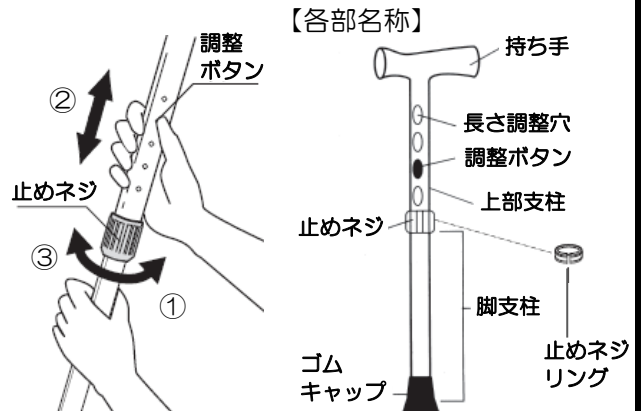

3. 保守・点検

使用前・使用後には必ず下記の事項を点検・整備し、常に安全な状態で使用してください。

- パイプに傷や亀裂が入っていないか、曲がっていないか確認してください。
- 杖先ゴムが破れたり、磨耗してはずれやすくなったりしていないか確認してください。異常のあるときはただちに交換してください。
- グリップ部にゆりみがないか確認してください。
- 調整ボタンがしっかり固定され、突出していることを確認してください。
- 汚れたときは、水を含ませた布を固く絞り、表面の汚れをふき取ってください。

4. 仕様

製品名	アクトモアステッキ きらら
カラー	ワイン/シャンパンゴールド/パープル/ブラック
サイズ	全長/68～88cm (2cm刻み11段階調節)
重量	約265g
材質	本体/アルミニウム、グリップ/EVA樹脂、杖先ゴム/合成ゴム (内径15mm)

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フクシのこトハ

フリーコール 0120-294-518

千葉本社 福祉本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港42-4
TEL: 043-301-8338

● アフターサービスのお問い合わせ

取扱店