

取扱説明書

アクトモア バックサポート パーム

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項や
使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1. ご使用上の注意



警告

【死亡または重傷を招く可能性のあるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 梱包用ポリ袋は、製品を取り出した後、穴をあけて廃棄してください。
ポリ袋を誤ってかぶったりすると、窒息する危険があります。
- 本製品を使用中の喫煙は、おやめください。
火種の落下などにより、やけどや火災の原因となります。



注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性のあるもの】

- 本製品は車いすの背もたれ以外の目的で使用しないでください。
- 必ず適合する車いすに取り付けてください。
- 水のかかる場所で使用しないでください。
- 火気、熱源に近づけないでください。
変形・変質・変色・燃焼のおそれがあります。
- 鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- 切断したり穴を空けて使用しないでください。
- 80度以上の高温な場所に長時間放置しないでください。
エクスジェルの品質を損なうおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所で保管しないでください。
- 立て掛けて保管しないでください。
エクスジェルパッドが変形するおそれがあります。保管する際は、平らな場所に置いてください。
- 分解や改造をしないでください。
事故の原因となり、ケガをするおそれがあります。

2. 製品の特徴


- 車いすへ簡単に後付けできるバックサポート。
座幅37.5~42.5cmの車いすに装着できます。
- 車いすの背シートに背骨が当たって起こる痛みやズレを、高機能ジェルパッドで軽減します。
- 4つのジェルパッドの位置を自由に変えられるため、体格や身体状況に合わせて調整できます。

エクスジェル
パッド



3.取り付けかた

- ① 車いすの背シートカバーを取り外します。
- ② 本製品のポケットが後ろ側になるようにカバーを取り付けます。
※利用者が座面の奥まで座れるように、臀部が入るスペースを作りカバーを取り付けてください
- ③ 利用者の体型や身体状況に合わせて、エクスジェルパッドの位置を決めて取り付けます。
エクスジェルパッドの裏にある面ファスナーが、しっかり貼り付くように取り付けてください。

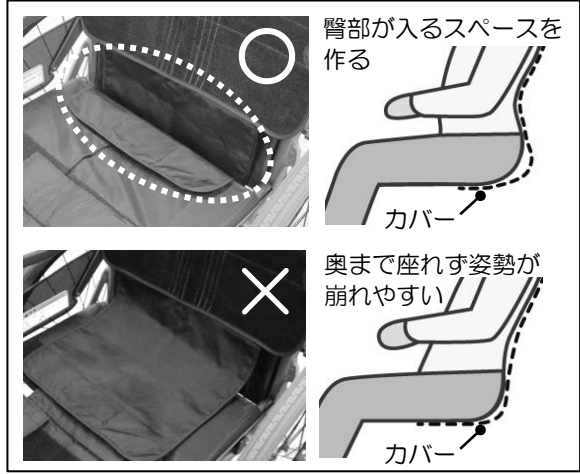

4.調整適合

4つのエクスジェルパッドは、体型や身体状況に合わせ、さまざまな位置に取り付けできます。


- ① 車いすに本製品のカバーのみを付けて座ります。
- ② 背シートに当たる背骨の位置を確認します。カバーのラインをめやすく背骨の両側の位置にパッドを取り付けます。

【背張り調整付き車いすの場合】
背張り調整を行い体に適合させた後、上記手順でパッドの位置を合わせてください。



5.お手入れの方法

- カバーは、中性洗剤を使用し洗濯ネットに入れて洗濯機で洗えます。

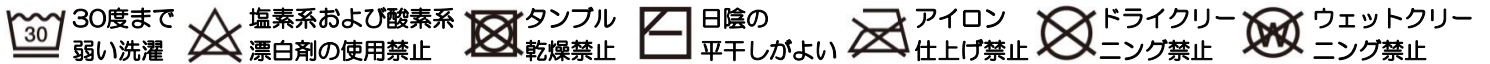

- パッドは洗濯できません。汚れたときは、水を含ませた布を固く絞り、表面の汚れをふき取ってください。

6.仕様

製品名	アクトモア バックサポート パーム	
サイズ	カバー	表面：幅44×高さ35cm / 裏面：幅33×高さ41.5cm
	パッド	大：幅20×高さ17.5×厚み2.5cm / 小：幅16.5×高さ8×厚み3.5cm
重量	約1kg	
適合車いす	座幅37.5~42.5cm / 面ファスナーが取り付けできる背シート仕様	
素材	カバー	ポリエステル、ナイロン
	パッド	エクスジェル、ウレタンフォーム

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フリーコール 0120-294-518
 フクシのコトハ
 千葉本社 福祉本部 〒261-0002
 千葉県千葉市美浜区新港42-4
 TEL: 043-301-8338

- アフターサービスのお問い合わせ

取扱店