

取扱説明書

Wellstyle サーモマグ専用

吸い口キャップ／スリットキャップ

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1. ご使用上の注意



警告

【死亡または重傷を招く可能性のあるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 欠けたり、ひびが入っている状態で使用しないでください。
ケガの原因となります。
- 暖房機器など火気の近くに置かないでください。
変色や変形の原因となります。



注意

【軽度または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- タワシや研磨剤で洗わないでください。
表面に傷がつくおそれがあります。
- 必ず洗ってからご使用ください。
- 洗った後はしっかりと乾燥させてから片づけてください。
変形するおそれがあります。
- 高い所から落とすなど、強い衝撃を与えないでください。
破損の原因となります。
- 耐熱温度は-30度～+70度までのため、食洗機を使用する場合は設定温度に気をつけて使用ください。

2.製品の特長

- 取り外しができるので、必要なときだけ簡単に取り付けて使用できます。
- 吸い口キャップは、ベッド上でも飲み物をこぼしにくい吸い口形状です。
- スリットキャップは、一気に飲み物が流れ込むことなく、スリットから適量が口元に届きます。

吸い口キャップ



スリットキャップ




3.使用方法

本製品をマグに取り付けて使用します。
上からしっかりとめ込み、本製品が外れないことを確認してください。

⚠ 注意

必ず洗ってからご使用ください。

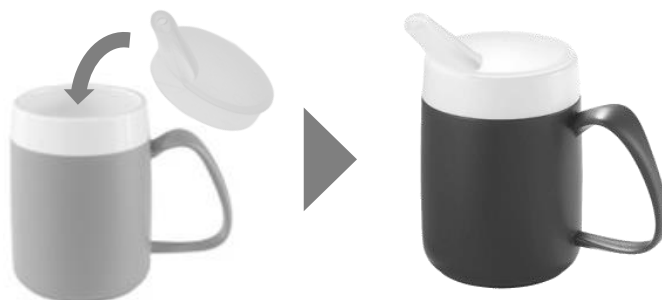

4.お手入れの方法

- 中性洗剤を使って、スポンジできれいに洗ってください。
- しっかりと水気を切って保管してください。
- 食洗機を使用する場合は70度以下に設定し、完全に運転を終了させてください。

⚠ 注意

- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 金属タワシや研磨剤を使用しないでください。
- 食洗機を使用する際は、落下したり、旋回しないように本製品を入れてください。

5.仕様

商品名	wellstyle サーモマグ専用	
	吸い口キャップ	スリットキャップ
サイズ（吸い口直径）	5mm	-
電子レンジの使用	可	
食洗機／乾燥機の使用	可 ※乾燥機設定温度70度以下	
材 質	ポリプロピレン	

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フリー
コール **0120-294-518**

千葉本社 福祉本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港42-4
TEL：043-301-8338

- アフターサービスのお問い合わせ

取扱店