

取扱説明書

Wellstyle ^{バイケア} Vicair マットレス

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。

1 ご使用上の注意



警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介助者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 心肺蘇生 (CPR) 処置などで心臓マッサージを行う際には、マットレスと体の間に大きく硬い板を入れるか、使用者をマットレスから下ろして処置してください。
マットレスがやわらかいため、十分な心臓マッサージの効果が得られません。
- 定期的に圧迫を開放してください。
本製品は効果的に体圧を分散しますが、長時間同じ姿勢を続けると床ずれの原因となります。
- 本製品の使用者最大体重 (250kg) を守ってください。



注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 使用中に体に異常や不安を感じた場合はただちに使用を中止し、当社までご連絡ください。
- 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。
カバー洗濯後など十分乾いていない状態での使用は、カビ発生や皮膚トラブルの原因となります。
- ベッドサイドに端座位をとる際に、必ずベッドを適当な高さに調整をしてください。
足がつかない高さで端座位をとると、ベッドから落下・転落の危険性があります。
- ベッド上で使用する場合は必ずベッドにサイドレールを取り付けてください。
ベッドから落下・転落の危険性があります。
- 使用する前に本製品にほつれや破損がないか、上面や裏面に異物がないか確認してください。
- 本製品に火気を近づけないでください。

2 製品の特長

- 体の部位に合わせて36個に分けられたブロックとスマートセルが最適な圧分散をしてくれます。
- 臥床するとブロック内のスマートセルが体に合わせて動き、局所圧を軽減できます。
- トップカバーとベースカバーは低摩擦でベッド上の動作時のズレを軽減します。

3 ご使用方法

- 足のマークまたは「足側」タグを足元側に向けて、ベッドまたは床の上に設置します。
- ベッドメイクの際は、伸縮性のあるシーツの使用をおすすめします。織物のシーツを使用する場合は、シーツをゆるめに掛けてください。
- ブロック内のスマートセルは抜いたり足したりせずご使用いただけます。スマートセルの数の調整が必要なときは、専門職の指導に基づいてご使用ください。※ブロック内のスマートセルを抜いたり足したりする1回の数のめやすは3つ単位で行うことを推奨します
- 臥床後、圧抜きをしてください。より体を包み込むようにフィットし、体圧分散効果が高くなります。

△注意 ベッドでご使用の際は、マットレスのサイズに合ったベッドをご使用ください。



4 日常のお手入れ

- 本体……洗濯できません。中性洗剤を含ませた布でふいてください。頑固なシミや汚れは、湿らせてやわらかいブラシで落としてください。

△注意 中性洗剤以外の強力な洗剤や研磨材、鋭利な物は使用しないでください。

- カバー……洗濯機（水温60度まで）の使用が可能です。

△注意 アイロンや乾燥機は使用しないでください。

5 仕様

製品名	Wellstyle Vicair ^{バイケア} マットレス
本体外形寸法	全幅90×全長190×厚み15cm
重量	約10kg
使用者最大体重	250kg
材質	中身（スマートセル）：ナイロン／トップカバー・ベースカバー：ポリエステル

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フリー
コール **0120-294-518**

千葉本社 福祉本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港42-4
TEL.043-301-8338

- アフターサービスのお問い合わせ

取扱店